

# Notfallbeatmung mit dem OXYLATOR®

## OXYLATOR® FR-300



Nach dem Öffnen der Sauerstoffflasche, den Bedienknopf des OXYLATOR® drücken und eine ¼ Umdrehung nach rechts drehen.



Maske dicht aufsetzen und mit Doppel-C-Griff oder Esmarch-Handgriff fest andrücken.



Bei dichtem Maskensitz beginnt der Beatmungszyklus. Der OXYLATOR® passt sich automatisch der Lunge an.

**Rhythmisches „Klacken“ oder ein „Schnarren“ des OXYLATOR® bedeutet ungenügende Kopfüberstreckung oder Atemwegsverlegung.**



**Ist die Inspirationszeit länger als 2 Sekunden, auf manuelle Beatmung umstellen.**

Manuelle Beatmung mit dem OXYLATOR® durch Drücken und Entlasten des Bedienknopfes.

**Eine Sekunde drücken des Bedienknopfes entspricht 500 ml Sauerstoffbeatmung.**